

КАЛЬКУЛЯТОР для определения оптической силы торических контактных линз ACUVUE®

СИЛА СФЕРЫ ОЧКОВОЙ ЛИНЗЫ	СИЛА ЦИЛИНДРА ОЧКОВОЙ ЛИНЗЫ											
	-0,75	-1,00	-1,25	-1,50	-1,75	-2,00	-2,25	-2,50	-2,75	-3,00	-3,25	-3,50
+5,75	+6,00	+6,00	+6,00	+6,00	+6,00	+6,00	+6,00	+6,00	+6,00	+6,00	-	-
+5,50	+5,75	+6,00	+5,75	+6,00	+6,00	+6,00	+5,75	+6,00	+5,75	+5,50	-	-
+5,25	+5,50	+5,50	+5,50	+5,75	+5,50	+5,50	+5,50	+5,50	+5,50	+5,25	-	-
+5,00	+5,25	+5,25	+5,25	+5,25	+5,25	+5,25	+5,25	+5,25	+5,25	+5,00	-	-
+4,75	+5,00	+4,75	+5,00	+5,00	+5,00	+5,00	+5,00	+5,00	+5,00	+4,75	-	-
+4,50	+4,75	+4,50	+4,75	+4,75	+4,75	+4,75	+4,75	+4,75	+4,75	+4,50	+4,50	-
+4,25	+4,50	+4,25	+4,50	+4,50	+4,50	+4,50	+4,50	+4,50	+4,50	+4,25	+4,00	-
+4,00	+4,25	+4,00	+4,25	+4,00	+4,25	+4,25	+4,00	+4,25	+4,00	+4,00	+3,75	-
+3,75	+4,00	+3,75	+4,00	+3,75	+3,75	+4,00	+3,75	+4,00	+3,75	+3,75	+3,50	-
+3,50	+3,50	+3,50	+3,50	+3,50	+3,50	+3,75	+3,50	+3,75	+3,50	+3,50	+3,25	-
+3,25	+3,25	+3,25	+3,25	+3,25	+3,25	+3,25	+3,25	+3,50	+3,25	+3,25	+3,00	-
+3,00	+3,00	+3,00	+3,00	+3,00	+3,00	+3,00	+3,00	+3,00	+3,00	+3,00	+2,75	-
+2,75	+2,75	+2,75	+2,75	+2,75	+2,75	+2,75	+2,75	+2,75	+2,75	+2,75	+2,50	-
+2,50	+2,50	+2,50	+2,50	+2,50	+2,50	+2,50	+2,50	+2,50	+2,50	+2,50	+2,25	-
+2,25	+2,25	+2,25	+2,25	+2,25	+2,25	+2,25	+2,25	+2,25	+2,25	+2,25	+2,00	-
+2,00	+2,00	+2,00	+2,00	+2,00	+2,00	+2,00	+2,00	+2,00	+2,00	+2,00	+1,75	-
+1,75	+1,75	+1,75	+1,75	+1,75	+1,75	+1,75	+1,75	+1,75	+1,75	+1,75	+1,50	-
+1,50	+1,50	+1,50	+1,50	+1,50	+1,50	+1,50	+1,50	+1,50	+1,50	+1,50	+1,25	+1,25
+1,25	+1,25	+1,25	+1,25	+1,25	+1,25	+1,25	+1,25	+1,25	+1,25	+1,25	+1,00	+1,00
+1,00	+1,00	+1,00	+1,00	+1,00	+1,00	+1,00	+1,00	+1,00	+1,00	+1,00	+0,75	+0,75
+0,75	+0,75	+0,75	+0,75	+0,75	+0,75	+0,75	+0,75	+0,75	+0,75	+0,75	+0,50	+0,50
+0,50	+0,50	+0,50	+0,50	+0,50	+0,50	+0,50	+0,50	+0,50	+0,50	+0,50	+0,25	+0,25
+0,25	+0,25	+0,25	+0,25	+0,25	+0,25	+0,25	+0,25	+0,25	+0,25	+0,25	plano	plano
plano	plano	plano	plano	plano	plano	plano	plano	plano	plano	plano	plano	plano
-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-0,50	-0,50
-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,75	-0,75
-0,75	-0,75	-0,75	-0,75	-0,75	-0,75	-0,75	-0,75	-0,75	-1,00	-0,75	-1,00	-1,00
-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,25	-1,00	-1,25	-1,25
-1,25	-1,25	-1,25	-1,25	-1,25	-1,25	-1,25	-1,25	-1,25	-1,50	-1,25	-1,50	-1,50
-1,50	-1,50	-1,50	-1,50	-1,50	-1,50	-1,50	-1,75	-1,50	-1,75	-1,50	-1,50	-1,75
-1,75	-1,75	-1,75	-1,75	-1,75	-1,75	-1,75	-2,00	-1,75	-1,75	-1,75	-1,75	-2,00
-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,25
-2,25	-2,25	-2,25	-2,25	-2,25	-2,25	-2,25	-2,25	-2,25	-2,25	-2,25	-2,25	-2,50
-2,50	-2,50	-2,50	-2,50	-2,50	-2,50	-2,50	-2,50	-2,50	-2,50	-2,50	-2,50	-2,75
-2,75	-2,75	-2,75	-2,50	-2,75	-2,75	-2,75	-2,75	-2,75	-2,75	-2,75	-2,75	-2,75
-3,00	-2,75	-3,00	-2,75	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-2,75	-3,00	-3,00
-3,25	-3,00	-3,25	-3,00	-3,25	-3,25	-3,25	-3,25	-3,25	-3,25	-3,00	-3,25	-3,25
-3,50	-3,25	-3,50	-3,25	-3,50	-3,50	-3,50	-3,50	-3,25	-3,50	-3,25	-3,50	-3,50
-3,75	-3,50	-3,75	-3,50	-3,75	-3,75	-3,50	-3,75	-3,50	-3,75	-3,50	-3,75	-3,75
-4,00	-3,75	-4,00	-4,00	-3,75	-4,00	-3,75	-4,00	-3,75	-4,00	-3,75	-3,75	-4,00
-4,25	-4,00	-4,00	-4,25	-4,00	-4,25	-4,00	-4,25	-4,00	-4,25	-4,00	-4,00	-4,25
-4,50	-4,25	-4,25	-4,50	-4,25	-4,50	-4,25	-4,50	-4,25	-4,25	-4,50	-4,25	-4,50
-4,75	-4,50	-4,50	-4,75	-4,50	-4,75	-4,50	-4,50	-4,50	-4,50	-4,75	-4,50	-4,75
-5,00	-4,75	-4,75	-5,00	-4,75	-4,75	-4,75	-4,75	-4,75	-4,75	-5,00	-4,75	-4,75
-5,25	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
-5,50	-5,00	-5,25	-5,25	-5,25	-5,25	-5,25	-5,25	-5,00	-5,25	-5,25	-5,25	-5,25
-5,75	-5,25	-5,50	-5,50	-5,50	-5,50	-5,25	-5,50	-5,25	-5,50	-5,50	-5,50	-5,50
-6,00	-5,50	-5,75	-5,75	-5,50	-5,75	-5,50	-5,75	-5,75	-5,75	-5,75	-5,50	-5,75
-6,25	-5,75	-5,75	-6,00	-5,75	-6,00	-5,75	-6,00	-6,00	-5,75	-6,00	-5,75	-6,00
-6,50	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
-6,75	-6,00	-6,00	-6,50	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
-7,00	-6,50	-6,50	-6,50	-6,50	-6,50	-6,50	-6,50	-6,50	-6,50	-6,50	-6,50	-6,50
-7,25	-6,50	-6,50	-6,50	-6,50	-6,50	-6,50	-6,50	-6,50	-6,50	-6,50	-6,50	-6,50
-7,50	-6,50	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-6,50	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-6,50	-7,00
-7,75	-7,50	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00
-8,00	-7,50	-7,50	-7,50	-7,50	-7,50	-7,50	-7,50	-7,50	-7,50	-7,50	-7,50	-7,50
-8,25	-7,50	-7,50	-7,50	-7,50	-7,50	-7,50	-7,50	-7,50	-7,50	-7,50	-7,50	-7,50
-8,50	-8,00	-7,50	-7,50	-7,50	-7,50	-8,00	-7,50	-7,50	-7,50	-7,50	-8,00	-7,50
-8,75	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00
-9,00	-8,50	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00
-9,25	-8,50	-8,00	-8,50	-8,00	-8,50	-8,50	-8,00	-8,50	-8,00	-8,50	-8,00	-8,00
-9,50	-8,50	-8,50	-8,50	-8,50	-8,50	-8,50	-8,50	-8,50	-8,50	-8,50	-8,50	-8,50
-9,75	-9,00	-8,50	-8,50	-8,50	-8,50	-9,00	-8,50	-8,50	-8,50	-8,50	-8,50	-8,50
-10,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-8,50	-9,00	-9,00	-9,00

ОПТИЧЕСКАЯ СИЛА СФЕРЫ КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ

ОПТИЧЕСКАЯ СИЛА ЦИЛИНДРА КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ:

- cyl -0,75
- cyl -1,25
- cyl -1,75
- cyl -2,25
- cyl -2,75
- используем сферическую линзу



Параметры торических контактных линз ACUVUE®:

ACUVUE OASYS®
for Astigmatism*
with** HYDRACLEAR® PLUS***

ACUVUE OASYS®
with** HYDRALUXE®
for Astigmatism*

1-DAY ACUVUE® MOIST****
for Astigmatism*
with** LACREON®

Сила сферы	от plano до -6,00 D (шаг 0,25 D)					от -6,50 D до -9,00 D (шаг 0,5 D)					от +0,25 D до +4,00 D (шаг 0,25 D)					от +4,25 D до +6,00 D (шаг 0,25 D)				
	cyl -0,75	cyl -1,25	cyl -1,75	cyl -2,25	cyl -2,75	cyl -0,75	cyl -1,25	cyl -1,75	cyl -2,25	cyl -2,75	cyl -0,75	cyl -1,25	cyl -1,75	cyl -2,25	cyl -2,75	cyl -0,75	cyl -1,25	cyl -1,75	cyl -2,25	cyl -2,75
10°	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
20°	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
30°	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40°	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50°	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
60°	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
70°	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
80°	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
90°	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
100°	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
110°	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
120°	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
130°	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
140°	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
150°	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
160°	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
170°	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
180°	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



ОНЛАЙН КАЛЬКУЛЯТОР
помогает рассчитать параметры
торических контактных линз быстро и удобно

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ.

Для получения дополнительной информации о правильном ношении контактных линз, уходе и безопасности обратитесь к инструкции по применению и/или на сайт www.jjvc.ru.
*Для астигматизма. **С технологией. ***Плюс. ****Увлажняющий.
© 2021, ООО «Джонсон & Джонсон». Товар сертифицирован. Рег. уд. № ФСЗ 2008/01309 от 08.04.2021 г., № ФСЗ 2010/07338 от 07.08.2018 г., № ФСЗ 2010/07714 от 02.03.2019 г.

23535208
RAC011214CAL
PP2021MLT5557